

ברוך הבא לערכת הבדיקה של

בחרת לבצע בדיקת GI של Nordic Laboratories. בדיקה זו
תשפוך מידע שיסיעו לך במסע האישוי לשמירה על בריאותך.

עתיד הרפואה מושתת על אסטרטגיות טיפול מותאמות אישית, שבמוסדות על מנת הנזק לבוכמיה הייחודית ולתורשה הגנטית שלך. בדיקה זו תשיעו בקבלה נתונים אובייקטיבים עלייר, אשר יאפשרו פיתוח של אסטרטגיית טיפול מדויקת יותר, ונקיטת צעדים שישיעו לך לשפר את בריאותך.

הערכתה שלפניך כוללת את כל החומרם הנחוצים לאיסוף הדינמיות. נא לך רוא בעין את ההוראות ולפעול על פיין שלב אחר שלב. תוצאות הבדיקה ישולחו לרופא המטפל שלך, לאחר כשלושה שבועות ממועד קבלת הדינמיות.
בכל שאלתך, חשב או בקשה לעזרה בהבנת תהליכי הבדיקה וההוראות, נא להזמין לצדות התמיכה שלנו בטלפון +45 33 75 10 00 .info@nordic-labs.com

תכונות הערכה

ציד איסוף

- 1 x מבחנה עם פקק כתום
- 1 x מנש איסוף
- 1 x שקיות פלסטיים עם פס סגירה עם PD סופר
- 1 x כפפה לשימוש חד-פעמי

ציד אריזה

- 1 x קופסה ובها מערכת האיסוף **(יש לשמור קופסה)**
- ולהשתמש בה להחזרת הדגימות בלבד**
- 1 x הוראות משלוח
- 1 x טופס פרטים אישיים
- 1 x מעתפה מרופדת
- 1 x שקית קירור עם גיל לתקפאה
- 1 x שקית להחזרת משלוח
- 1 x מסמך להחזרת המשלוח
- 2 x חשבוניות עסקה (**רק אם אתה מבצע משLOW מארץ שאינה חלק מהאיחוד האירופי**)

אם פריט כלשהו חסר או פג תוקף, נא להזמין לטלפון 16 20 15 80 0(0)44+ או לשלוח הודעה דוא"ל לכתובת .testkits@nordicgroup.eu

لتשומת לב: אי ביצוע מחזק של הוראות האיסוף עלול לנגרם לעיכוב בקבלה התוצאות או לצורך באיסוף חזוז, ועקב כר חיבוב בעלייתנו נזיפות.

הכנות

נא למלא את הפרטים הבאים

- טופס פרטיים איסיים: יש לוודא שהפרטים הרשומים בטופס נכונים, ולתקן אותם במקרה הצורך.

זמן המשלוח

- יש לבצע את הבדיקה במהלך יום אחד, ולשלוח אותה בתוך 24 שעות. כדי להבטיח שהבדיקה תניע אלינו במסגרת חלון הזמן הדורש, עלין לאסוף את הדגימה ביום'A' או'B' (אם איסוף הדגימה מתבצע ביום'A', עלין לשלחו אותה ביום'B', שכן חברות השילוח לא אוספות משלוחים במהלך סוף השבוע). ניתן לבצע את איסוף הדגימה בכל שעה במהלך היום, באחד הימים האלה.

במקרה של נטילת תרופות או תוספי מזון

- נא להימנע מנטילת אספירין ביוםיהם שלפני איסוף הדגימה.

חשוב

- אוון להפסיק נטילת תרופות מרשםatabil להרוויע תחילת ברופא המתפלל.
- יש למנוע מגע בעור וב uninימים של הנוזל אשר בתוך המבחנות. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף בשפע של מים במשך 15 דקות. במקרה של מגע בעור, יש לשטוף היטב במים וסבון. במקרה של בליעה, יש לפנות מיד לקליטת ערזה רפואי.
- יש להרחיק את המבחנות מהישג ידם של ילדים.
- נא לוודא ששקית הקירור קפואה לנמריו לפני המשלוח.

שיטת האיסוף

שלב 1:

יש לרשום את השם המלא, התאריך ושעה איסוף הדגימה על התווית שמודבקת ל מבחנה עם הפיקק הכתום.




שלב 2:

יש לערשות את הקפפה החד-פעמאות. יש לאסוף דגימת צואה לתוך מנש האיסוף (יש למנוע זיהום של הדגימה בשתי, דם וסת או מים מתוך האסלה).




שלב 3:

יש לפתח את הפיקק הכתום של המבחן בהברנה. בעזרת הכפית המחויבת לפיקק, יש להעביר צואה מאוזרים שונים של הדגימה אל תוך המבחן. יש להקפיד שכמות מספקת של צואה מתועבת עם הנוזל שבחבינה. על התערובת להגיע לכאן המלא אך לא מעבר לו. יש להברиг את המכסה בחזקה.

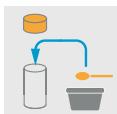

שלב 4:

יש לנער את המבחן עם הפיקק הכתום בצורה נמרצת במשך כ-30 שניות, כדי לערबב את דגימת הצואה עם הנוזל המשמר שבתוכו המבחן.

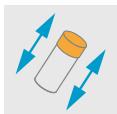


שלב 5:

יש לרשום את מידת הסמיכות של הצואה על צד המבחן (נא לעיין בתרשים ההסביר על סמיכות הצואה).




שלב 6:

יש להכניס את המבחן עם הפיקק הכתום לתוך שקיות הפלסטייק עם פס הסירה, ולסגור אותה richtig. יש להכניס את השקיות לתוך המעתפה המורופדת, ולאחר מכן להכניס את המעתפה למקרה.

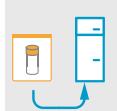

שלב 7:

שלוחן לחרטור את המעטפה המרופדת בתוך המקרר ואת שQUIT הקירור במקפיא עד למשלוח הבדיקה.

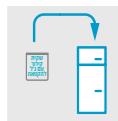

מפתח לקביעת מידת הסמכות של הוצאה:



מיימת/שלשול



צואה רכה



רגילה



קשה/עכירות

הכנות למשלוח

תזמון המשלוח

- שלוחן את הדגימה באותו יום שבו בוצע איסוף הדגימה (לא אם האיסוף מתבצע ביום אי', שכן חברת השילוח לא מבצעת איסוף חבילות במהלך סוף השבוע). אם אין אפשרות לשולח את הדגימה באותו יום שבו בוצע האיסוף, שלחו את המעטפה המרופדת, שבתוכה המבחן עט הפוך הכתום, בתוך המקרר ואת שQUIT הקירור במקפיא עד למשלוח הבדיקה. אין לאחסן יותר מיממה אחת. יש לשולח את הדגימה בתוך 24 שעות. איןzeit להוראה זו עלול לחיבב איסוף חזרה של הדגימה.
- יש לבצע את המשלוח רק ביום ב' או ג'. אם אין אפשרות לשולח בהתאם איסוף משלוח ליום ב', ניתן למתאם זאת ליום נ' אך לא יותר מזה.

לפני המשלוח

- נא לוודא שמלאת את הפרטים הבאים:
 - טופס פרטים אישיים: נא לוודא שהטופס מולא בשמלמות.
 - חשבוניות עסקה: נא למלא את החשבוניות המצורפות (רק **למי שמבצע משלוח מארץ שאינה חלק מהאיחוד האירופי**).
- הכתת המשלוח:
 - שלחוץ את המעטפה המרופדת המכילה את הדגימה מהמקרר ולהכניס אותה ייחד עם שQUIT הקירור הקפואה לתוך השקית המשלוח. לאחר מכן, יש להכניס את השקית לחומרם ביולוגיים מסוכנים לתוך קופסת המשלוח. גם טופס הפרטים האישיים האישיים המלא.
 - שלhcannis את הקופסה למשלוח נס.
 - שלhcannis את הקופסה לתוך השקית המשלוח (ראה הוראות משלוח).



+45 33 75 10 00 • Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark
info@nordic-labs.com • www.nordic-labs.com

Copyright 2020 Nordic Laboratories ©
תמודות תשלום או למתורות מוסחריות, או>Edit שינויים בחזקן המאמר אסורים בהחולץ.