

Prepare o seu envio

Quando agendar o envio:

- Envie a amostra logo que possível. Se não conseguir enviar as amostras no mesmo dia em que completou a colheita, como por exemplo durante um fim-de-semana ou feriado, mantenha a caixa que contem o frasco de tampa amarela e o frasco de tampa preta no frigorífico e o frasco de tampa branca no congelador, juntamente com a bolsa de congelação até ao momento do envio. Não os conserve por mais de 3 dias.
- Agende o envio para que as suas amostras cheguem ao laboratório durante a semana, uma vez que fecha ao fim-de-semana.

Assim que estiver pronto a enviar:

- Assegure-se que forneceu a seguinte informação:
 - Formulário - Personal Information Form: devidamente preenchido.
 - Pro-forma Invoices: preencha os documentos enviados (**apenas necessário se estiver a enviar a partir de um país fora da UE**).
- Prepare o seu envio:
 - Retire do congelador o envelope que contem o frasco de tampa branca assim como a bolsa de congelação e coloque na caixa, juntamente com o formulário devidamente preenchido e os sacos selados com as restantes amostras.
 - Coloque a caixa dentro do saco da DHL e envie (verifique as intruções para envio).



Nygade 6, 3.sal . 1164 Copenhagen K . Denmark . Tlf: +45 33 75 10 00

info@nordic-labs.com . www.nordic-labs.com

© Copyright 2021 Nordic Laboratories. Reproduction may be made for personal use only. Systematic electronic or print reproduction and distribution including duplication of any material in this paper for a fee or for commercial purposes, or modification of the content of the paper are prohibited.



GI360 x 1

PORT

Bem-vindo ao kit do seu teste

Irá realizar o teste denominado Gi360x1 da Nordic Laboratories, do qual obterá informação de apoio à sua saúde.

O futuro da medicina é o tratamento personalizado, tendo por base a sua informação bioquímica e genética sua. Este teste irá dar-lhe dados seus para que possa seguir uma estratégia de tratamento personalizada e permitirá que estabeleça níveis superiores de saúde.

Neste kit encontrará todo o material necessário para proceder à colheita. Por favor leia atentamente as instruções e siga passo a passo. Os seus resultados ficarão disponíveis para o seu profissional de saúde dentro de três semanas após recepção das amostras.

Se tiver alguma questão, preocupação ou precisar de apoio, por favor contacte a nossa equipa de apoio pelo +45 33 75 10 00 ou via e-mail info@nordic-labs.com.

Verifique o seu Kit

Materiais para envio:

- 1 x Caixa que contém o kit (**por favor conserve esta caixa para devolver a amostra**)
- 1 x Instruções para envio
- 1 x Formulário de pedido do teste - Personal Information Form
- 1 x Saco de gel para congelar
- 1 x Saco DHL
- 1 x Envelope almofadado
- 1 x Carta de porte DHL
- 2 x faturas pró-forma (**incluídas apenas se você estiver enviando de um país fora da UE**)

Materiais para colheita:

- 1 x Saco de plástico selável
- 1 x Luva descartável
- 1 x Tabuleiro de colheita de amostras
- 1 x Frasco de tampa preta
- 1 x Frasco de tampa amarela
- 1 x Papel absorvente
- 1 x Saco separado que contém:
 - 1x Saco de plástico selável
 - 1 x Frasco de tampa branca
 - 1 x Papel absorvente

Se algum item estiver em falta ou fora de validade por favor contacte a Nordic laboratories testkits@nordicgroup.eu ou 0044 (0)1580 201687

Atenção: caso as instruções de colheita não sejam seguidas, poderá ocorrer em atrasos nos resultados ou necessidade de nova colheita o que implicará custos adicionais.

Preparação

No formulário de pedido do teste (Personal Information Form):

- Preencha os seus dados e do seu médico/prescritor.
- Em 'test requested', selecione a opção GI 360.
- Em 'sample information', escreva a data e horários de cada recolha.
- Em 'comments', escreva o nome de medicamento(s) e/ou suplemento(s) que esteja a tomar.

Medicação/Suplementos

- Deverá abster-se do seguinte:
 - Tomar antibióticos, anti-parasitários, anti-fungicos,, inibidores da bomba de prótons e probióticos até 2 semanas antes à recolha das amostras, a menos que tenha indicação contrária por parte do seu profissional de saúde.
 - Tomar enzimas digestivas, laxantes (especialmente óleo mineral ou óleo de rícino), aspirina ou outros AINEs, carvão activado, betaina HCL, antiácidos ou bentonita até 2 semanas antes à recolha das amostras, a menos que tenha indicação contrária por parte do seu profissional de saúde.
 - Nunca suspenda nenhum medicamento/suplemento sem consultar primeiramente o seu profissional de saúde.

Notas importantes:

- Não faça a colheita das amostras caso haja um sangramento activo por hemorróidas ou menstruação.
- Aguarde pelo menos 4 semanas após uma colonoscopia ou enema de bário antes de colher as amostras.
- Evite o contacto da pele ou dos olhos com os líquidos no interior dos frascos de colheita. Caso haja contacto com os olhos, lave abundantemente com água durante 15min. Caso haja contacto com a pele lave com água e sabão. Contacte imediatamente o seu médico caso haja ingestão accidental
- Mantenha os frascos fora do alcance das crianças.

Indicadores Consistência das Fezes



Duras/Obstipação



Formadas/Normal



Fezes moles



Líquidas/Diarreia

Procedimento de Colheita

Colheita de fezes



Passo 1:

Escreva o seu nome e data de colheita na etiqueta colada nos frascos de tampa preta, amarela e branca.



Passo 2:

Coloque a luva descartável. Colha a amostra no tabuleiro de colheita (NÃO contamine a amostra com urina, sangue menstrual ou água da sanita).



Passo 3:

Abra o frasco de tampa preta e o frasco de tampa amarela. Use a colher presa à tampa para transferir diferentes partes da amostra para dentro dos frascos. Certifique-se de que há fezes suficientes misturadas com o líquido, ultrapassando a linha de preenchimento (não deve estar abaixo da linha). Aperte bem a tampa.



Passo 4:

Agite AMBOS os frascos de tampa preta e amarela vigorosamente durante aproximadamente 30s para misturar a amostra com o conservante do interior do frasco.



Passo 5:

Registe a consistência das fezes na lateral do frasco (referente aos indicadores de consistência das fezes).



Passo 6:

Coloque os frascos dentro do saco selável. Coloque o saco dentro da caixa e deixe no frigorífico até ao momento do envio. NÃO congele.




Passo 7:

Abra o frasco de tampa branca. Use a colher presa à tampa para transferir diferentes partes da amostra para dentro do frasco (garanta que tem amostra suficiente mas não exceda a linha de enchimento). Coloque novamente a tampa e aperte bem.



Passo 8:

Registe a consistência das fezes na lateral do frasco (por favor consulte os indicadores de consistência das fezes).

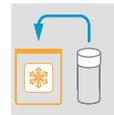

Passo 9:

Coloque o frasco de tampa branca dentro do outro saco selável. Coloque a bolsa com gel de congelação na bolsa da parte de trás do saco, coloque o saco dentro do envelope e coloque-o no congelador. Congele durante pelo menos 6h.



Passo 10:

Aponte a data do dia de colheita na formulário de informação pessoal.